

病理ブロック ケース

大切な病理標本ブロックを保護します。

標本ブロックを保管したり移送したりする際に、接触や圧迫する事で変形および破損する事を防ぐ為の保護ケースです。

【特徴】

- ◇ 透明プラスチック容器を使用しているため内容物や記録情報が目視確認できる。
- ◇ 病理標本ブロックの保護する役目としてスポンジ3枚を付属して破損・変形を防止できます。
- ◇ スポンジを入れて病理標本ブロックは、安定させていますので容器内でガタつかない。
- ◇ 病理標本ブロックは容器内で安定しているので保管・移送に便利です。
- ◇ 病理標本ブロックの作成年月日等の情報を記入する記録紙を付けています。

○病理ブロックケース



【使用方法】

1. 本体ケースにスポンジ(黒)を1枚または2枚敷く
2. スポンジ(黒)の上に病理ブロック標本をのせる
3. 病理ブロック標本の上に1枚または2枚のせる
4. 記録紙に必要事項を記入する
5. 本体ケースを閉じる

* お客様の用途でご自由にお使いください

商品No	商品名	規格	包装
91001	病理ブロックケース	本体ケース 1個 (W58 × D38 × H22mm) 記録紙1枚 スポンジ3枚	1箱 (10セット)

株式会社 硝英製作所 <http://www2u.biglobe.ne.jp/shoeiss>

TEL : 03-3831-8876 FAX : 03-3834-0614 E-mail : shoeiseisakusho@mwb.biglobe.ne.jp